

Σετ εργαλείων για την τεχνική του «Soft- Brushing»



1. Η γενική ιδέα: η ιδέα του «Μαλακού Βουρτσίσματος» είναι να αποδιοργανώνει τις ίνες κολλαγόνου από το ινώδες περίοστεο: η ακαμψία μειώνεται και η απελευθέρωση του κρημνού αυξάνεται με τη χρήση των βουρτσών.

2. Τα εργαλεία του βουρτσίσματος δεν κόβουν καθόλου: Η απελευθέρωση του κρημνού είναι το αποτέλεσμα του διαχωρισμού των ινών του περίοστεου.

3. Το σετ περιέχει 5 εργαλεία

- A. Κανονικό
- B. Γωνιακό R (δεξιά) για την οπίσθια περιοχή
- Γ. Γωνιακό L (αριστερά) για την οπίσθια περιοχή
- Δ. Μεσαίου μεγέθους
- Ε. ΧL μεγέθους

4. Υπάρχουν δύο δυνατότητες για βούρτσισμα: μαλακό και ελαφρά επιθετικό



ΣΤ. Ριζικά προς μυλικά: μαλακό

Z.: Μυλικά προς ριζικά: η βούρτσα είναι περισσότερο σκληρή (όταν ο κρημνός έχει ουλές: είναι πιθανό να είναι πιο επιθετικό)

5. Το βούρτσισμα γίνεται μετά την ανύψωση κρημνού ολικού πάχους: όσο πιο βαθιά γίνεται.....

Το βούρτσισμα είναι δυνατό μόνο μετά την ανύψωση κρημνού ολικού πάχους, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό βαθύτερη.

Τραβήξτε τον κρημνό με τη λαβίδα και αρχίστε το βούρτσισμα με μικρού μεγέθους εργαλεία (κανονικό ή γωνιακό για την οπίσθια περιοχή). Η κίνηση είναι πολύ ακριβής: η βούρτσα είναι σε επαφή με το περίοστεο και κάνουμε την ίδια εφαρμογή: έκταση και βούρτσισμα με κυκλική κίνηση.

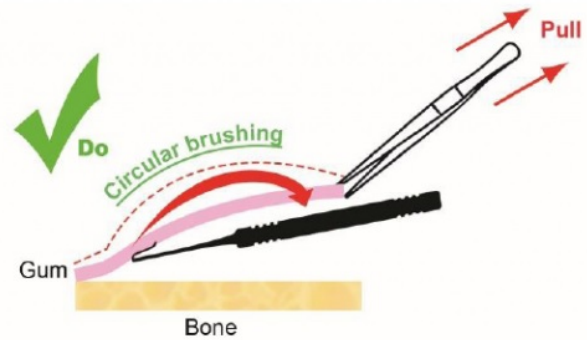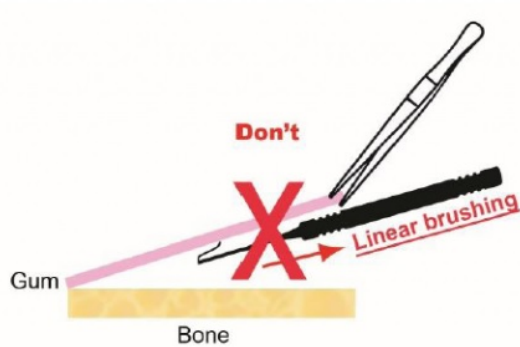

Μετά την πρώτη απελευθέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεσαίου μεγέθους ή XL εργαλεία σε μεγάλους κρημνούς.

6. Η απελευθέρωση του κρημνού αυξάνει πολύ γρήγορα. Ευκολία για την αύξησή του, περισσότερο του ενός εκατοστού.
7. Μερικές φορές χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Συνεχίστε το βούρτσισμα μέχρι η απελευθέρωση να είναι αρκετή.
8. Στον γλωσσικό κρημό, είναι πολύ εύκολο και ασφαλές να διαχωρίζεις το μυλοϋσειδή μυ πολύ απαλά βουρτσίζοντάς τον μόνο. Επίσης είναι πιθανό να βουρτσίζεις το περίοστεο του γλωσσικού κρημνού.

Μετά το βούρτσισμα, μπορείς να ελέγξεις το περίοστεο, δεν έχει καταστραφεί.



ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε.
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 157
11527 ΓΟΥΔΗ
ΤΗΛ: 210/7716416
ΦΑΞ: 210/7711100
e-mail: info@tsaprazis.gr